

使用に際してはこの添付文書をよくお読みください。  
また、必要な時に読めるように保管しておいてください。

8 T O 7 T

\*\*2022年 4月改訂 (第7版)

\*2020年10月改訂 (第6版)

体外診断用医薬品の補助試薬

製造販売承認番号：226AAAMX00015000

インタクト副甲状腺ホルモンキット

ルミバルスプレスト® whole PTH「SBBIO」

PTHキャリブレータ

### ■全般的な注意

1. 本試薬は、体外診断用であるため、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 本試薬は、ルミバルスプレスト whole PTH「SBBIO」専用のキャリブレータで血清または血漿中のwhole PTH濃度測定の際に用います。
3. 本書以外の使用方法については保証を致しません。
4. 本試薬および検体は、感染の危険性があるものとして十分に注意して取扱ってください。
- \*\*5. 使用に際しては、本書とあわせ、ルミバルスプレスト whole PTH「SBBIO」の電子添文、使用する測定システムの電子添文および取扱説明書をご参照ください。

### ■形状・構造等（キットの構成）

PTHキャリブレータ：2濃度×1

- (1) 0 pg/mL PTHキャリブレータ（液状、3.0 mL×1）
- (2) 5000 pg/mL PTHキャリブレータ（液状、1.5 mL×1）

### ■用法・用量（操作方法）

1. 本試薬は別売の試薬と組み合わせてそのまま使用します。
2. 本試薬は、常温（15～25℃）に戻してから軽く転倒混和して使用します。
3. デッドボリュームを考慮して、サンプルカップに必要な量を滴下します。
  - ・溶液1滴あたりのおよその滴下量は45μLです。滴下量は容器を押す強さや気泡の混入によって変動します。滴下の際に液滴の中に気泡が多量に混入する場合は、残量が僅かですので新しい試薬を使用してください。サンプルカップに泡が残りますとサンプリング不良の原因になる場合があります。
  - ・デッドボリュームはご使用の測定システムによって異なりますので各測定システムの取扱説明書をご覧ください。例としてルミバルス Presto IIおよびルミバルス L2400でサンプルカップをご使用の場合、デッドボリュームは100μLとなります。

### ■使用上又は取扱い上の注意

#### 1. 取扱い上（危険防止）の注意

- (1) 検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、また口によるピペッティングを行わないでください。
- (2) 試薬が誤って目や口に入った場合は、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。

#### 2. 使用上の注意

- \*\*1. 使用に際しては本書とあわせ、ルミバルスプレスト whole PTH「SBBIO」の電子添文、使用する測定システムの電子添文および取扱説明書に従ってください。
- (2) 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。本試薬の外箱および容器の表示をご確認のうえ使用してください。
- (3) 本試薬使用に際しては、分取時の汚染に注意し、分取後は速やかに密栓して保存してください。
- (4) 試薬は保存条件を守って使用してください。特に凍結しないように注意してください。
- (5) 検体および本試薬は蒸発による濃縮を考慮し、サンプルの準備後は速やかに測定を開始してください。

#### 3. 廃棄上の注意

- (1) 試薬および容器等を廃棄する場合は、廃棄物に関する規定に従って、医療廃棄物または産業廃棄物等区別して処理してください。
- (2) 廃液の廃棄にあたっては、水質汚濁防止法などの規制に従って処理してください。
- (3) 使用した器具（ピペット、試験管等）、廃液、サンプリングチップ、キューベット等は、次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度1000ppm、1時間以上浸漬）、グルタールアルデヒド（2%、1時間以上浸漬）等による消毒処理あるいは、オートクレーブ（121℃、20分以上）による滅菌処理を行ってください。
- (4) 検体、廃液等が飛散した場合には次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度1000ppm、1時間以上浸漬）、グルタールアルデヒド（2%、1時間以上浸漬）等によるふき取りと消毒を行ってください。

(5) 消毒処理に使用する次亜塩素酸ナトリウム溶液、グルタールアルデヒド溶液が、皮膚についたり、目に入らないように注意してください。

### ■貯蔵方法・有効期間

PTHキャリブレータ 2～10℃に保存 有効期間：1年

使用期限については、外箱および容器の表示をご参照ください。

### ■包装単位

コードNo.	品名	包装
* 713200100	ルミバルスプレスト whole PTH 「SBBIO」 PTHキャリブレータ	2濃度×1 (0pg/mL PTHキャリブレータ ：3.0mL×1、 5000pg/mL PTHキャリブレータ ：1.5mL×1)

### ■問い合わせ先

\*\*住友ベークライト株式会社 S-バイオ事業部  
兵庫県尼崎市東塚口町二丁目3番47号  
TEL：0120-96-5953  
FAX：06-7223-8691

富士レビオ株式会社 お客様コールセンター  
TEL：0120-292-832

### ■製造販売元

富士レビオ株式会社  
\*\*神奈川県相模原市中央区田名塩田1丁目3番14号

\*\*販売元

 住友ベークライト株式会社  
東京都品川区東品川二丁目5番8号

製造販売元

 富士レビオ株式会社